




使用說明

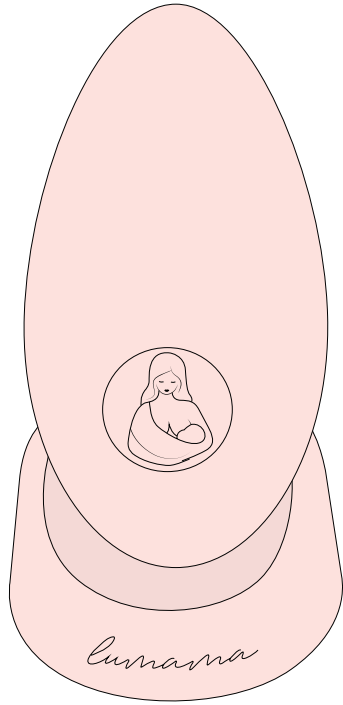

恭喜你成為媽媽，
也預祝妳一個舒適開心的哺乳旅程！

Jenelle Zingg
Mamma Ease, LLC.

©2021 Lumama Pro Lactation Massager
by
MammaEase
Designed for you in Cardiff, California

使用建議

哺餵或擠乳前



- 可以將月精靈放在胸罩內震動，放鬆乳房。

哺餵或擠乳時



- 將月精靈尖端朝下放置，並以旋轉的方式慢滑向乳頭。使用時不需過度用力，服貼在乳房上輕滑過即可。
- 將月精靈側面服貼在乳房外側，並往乳頭方向移動。

產後發奶(生理性腫脹)期間



- 將月精靈從乳暈往乳房外圍方向滑動。若不適狀況持續或疑似乳腺發炎現象，務必洽詢醫療專業人士。



- 親餵時使用月精靈。



- 擠乳時使用月精靈。




品名: 月精靈^{PRO} 型號: ME69706 (粉紅); ME95064 (牛奶白)
額定電壓: 3.7V 額定功率: 2.4W 電池容量: 650mah
入數: 月精靈、充電座、座充線、旅充線、便攜袋各 1 入
不含充電頭 (請搭配使用 5V1A USB-a 充電供應源)

進口商: 馨力陽有限公司 客服電話: (02) 2511-8669
統一編號: 29047166 地址: 台北市南京東路一段25號3樓
委製商: Mamma Ease 電話: +1 760-473-9344
地址: PO Box 465 Cardiff, CA 92007, USA



開機、調整溫敷 & 按摩強度

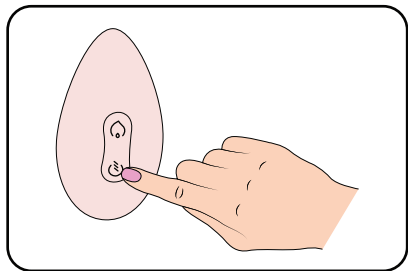


溫度控制
開關/震幅控制

- 長按開關按鈕 3 秒鐘可開啓月精靈，開關燈將亮起。
- 開啓後，按下「開關/震幅控制」按鈕可調整 5 段強度。最高強度模式下，再按一下可關閉震動。
- 開啓後，按下「溫度控制」按鈕可啓動並調整 2 段溫度，長按關閉加溫。
- 再次長按開關按鈕可完全關閉月精靈。
- 充電時顯示粉紅色燈號，完全充電後燈號變成紫色。
- 將內附 USB to Type-C 充電線插入充電座，並使用 5V1A USB-a 充電供應源 (產品未附)。
- 將月精靈放置在充電座上，磁力充電將接觸並開始充電。


使用說明

- 親餵和擠乳前可先使用熱毛巾，或月精靈的「加溫」功能，溫敷乳房 3-5 分鐘。
- 按摩器全機防水，也可沖澡或泡澡時使用。
- 使用按摩器輕按摩，利用按摩器側面或曲面，來回由乳房移動到乳頭的方向，單邊乳房 5-10 分鐘。
- 按摩器的尖端可局部按摩，輕輕按摩乳暈並來回往乳頭的方向移動，單點約 2-5 分鐘。
- 使用按摩器側面按摩來做親餵或擠乳前準備。
- 漲奶時可使用按摩器曲面處按摩乳房。
- 初次使用請先以第一段弱速震動及溫度試用，了解自己合適的強度。

月亮型尖端可局部按摩

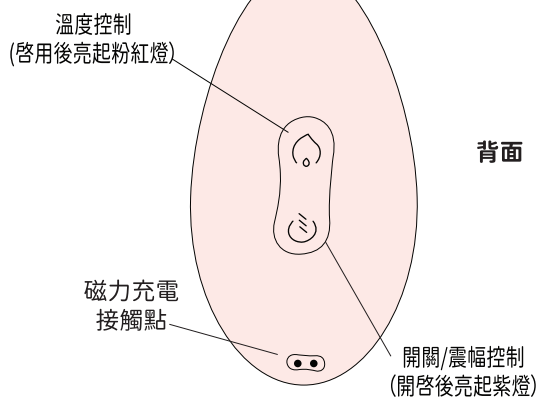

背面

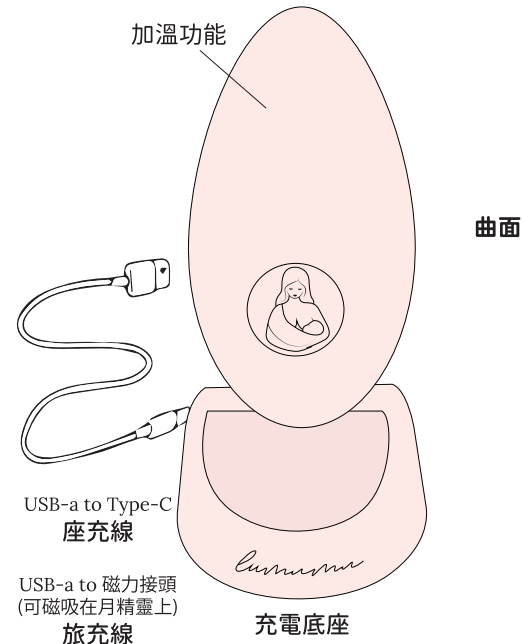

曲面

清洗保養方式



1. 使用前請以清水及肥皂，或溫和清潔液清洗。
2. 可直接沖洗清洗。
3. 使用後請擦拭風乾，保持完全乾燥，並儲存於通風處並避免陽光直射。
4. 充電座無防水功能，勿接觸水源。

充電



1. 月精靈^{PRO} 使用無線磁吸方式充電。
2. 請勿在充電底座與月精靈間放置任何東西。
3. 充電前確保所有接觸端子乾淨且乾燥。
4. 放入充電座後，粉色燈亮起才是正常充電。
5. 用力拉扯線材易造成人為損害請保固失效。
6. 請使用合格認證安全充電頭 (內未附)。

注意事項/緊急處理方法

- 若需搭配使用按摩油，建議使用水性基底按摩油，禁止使用矽油按摩油。
- 親餵時使用需注意按摩器擺放位置以不影響寶實嘴巴含乳為適宜。
- 請於說明書建議使用時間內使用，避免過度使用造成乳房不適。按摩時不應造成乳房疼痛，若有不適狀態請休息或暫停使用，若無改善請務必盡快看診檢查。
- 針對個別狀況所需的按摩技巧建議諮詢醫療專業人士或泌乳顧問。
- 如乳房不適的現象持續超過 24 小時或有類似感冒 (頭痛身體酸軟無力伴隨乳房疼痛或皮膚發紅、體溫上升...) 等) 症狀，請諮詢醫療專業人士或泌乳顧問。
- 退奶的過程中，避免過度加溫和按摩刺激乳房。
- 若乳房皮膚有傷口時，建議暫停使用。
- 避免碰撞及掉落，以免損壞。
- 超過 75°C 時請勿使用。

規格

- 專利月亮造型 - 大面積可服貼乳房，尖端可針對局部乳腺按摩
- 按摩器尺寸約 10 x 5.2 x 3.7 公分
- 5 段震動頻率，最高每分鐘 11000 轉
- 2 段加溫功能，高溫約 44°C；低溫約 41°C (需約 2~3 分鐘預熱時間)
- 充電方式: 磁力無線充電; 需自備充電頭 (使用 5V1A USB-a 充電供應源)
- 充電時間 (完全充電) 最多需要約 130 分鐘
- 充電時顯示粉紅燈號; 充電後顯示紫色燈號
- 續航力: 震動加溫同時最強設定下，可使用約 70 分鐘
- 單獨使用最弱震動模式，可使用約 7 小時
- 續航力將因使用習慣及電池耗損而下降
- 防水規格 IPX7 可全機入水最多 1m，不超過 30 分鐘

警告

- 充電時禁止使用; 充電時勿靠近水源; 月精靈完全乾燥時才能充電。
- 務必閱讀說明書後使用; 使用前移除包裝材料並遠離孩童。
- 本產品並非醫療器材，無治療、檢測等功能，僅為手持輔助按摩乳房工具。乳房若有不適，請諮詢醫療專業人士或泌乳顧問。

保固

本產品提供購買日起一年之保固。產品在保固期限內 (應出示購買發票) 且於正常使用情形下發生故障，經本公司鑑定為原廠製造之瑕疵者，在保固期限內由本公司提供維修或替換之服務，如無法修復或無相同產品，則本公司得以相近規格之產品替換。一般使用之磨損、刮傷、髒污、褪色或因其他不當使用而產生之毀損，及其他非原廠產品本身瑕疵所造成的問題，均不在保固範圍內。產品本身瑕疵存否，同意由本公司進行鑑定。任何未授權的拆卸及修理等將喪失保固權益。